
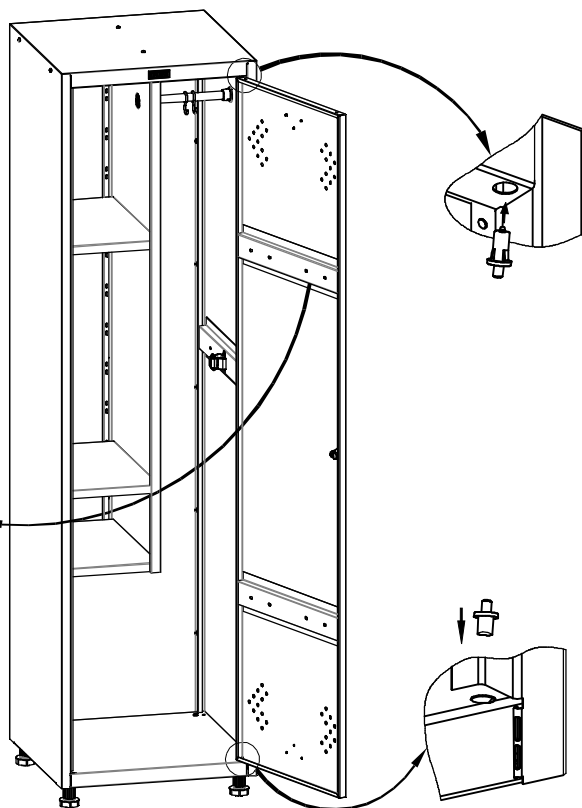


x 1

x 1

x 3

Установки крючка для полотенца:
 1. Сжать крючки установить его прямыми концами в овальное отверстие на ребре двери.
 2. Аналогично можно установить крючок на ребро правой стенки шкафа.

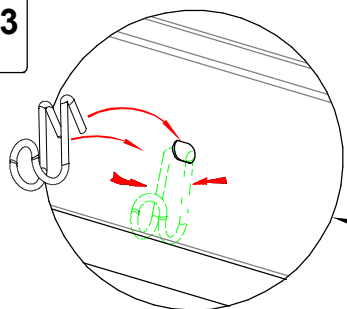

Порядок установки дверей:

1. Вставить оси в отверстия в дне и крыше до упора:
 - в нижнее отверстие обычную пластиковую ось;
 - в верхнее отверстие пластиковую с подпружиненным металлическим стержнем;
2. Одеть дверь на нижнюю ось.
3. Подвести верхний угол двери к верхней оси, утопить подпружиненный шток оси и вставить дверь. Ось должна "отщелкнуться" в отверстие двери.

Примечание. Перед установкой двери убедитесь что шток оси свободно входит в отверстия, при необходимости (не входит шток) очистить отверстия от краски.

Важно! При наличии вертикального люфта двери, необходимо устранить его, путем подкладывания регулировочной шайбы (входит в комплектацию) под ось

5

Пояснения к инструкции.

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий и комплектующих для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.


Рекомендации по эксплуатации шкафа.

1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.

Примечания

1. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

Инструкция по сборке шкафа медицинского МД 1 ШМ-SS

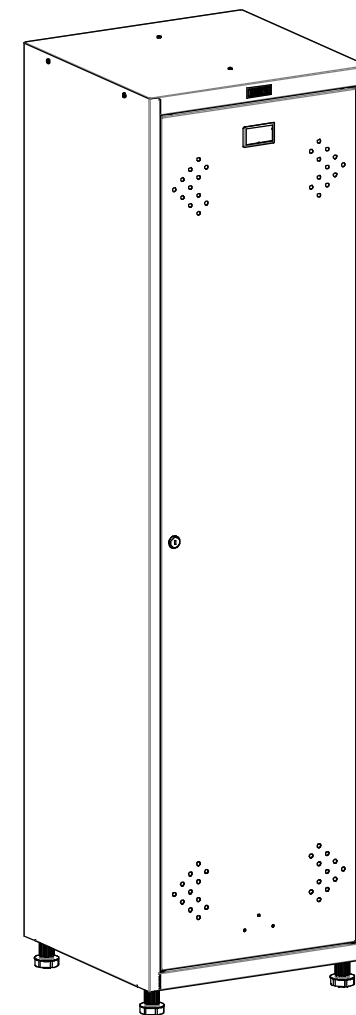


Установка боковых стенок и основания

x 12

4.2x13
x 2

Рис.1

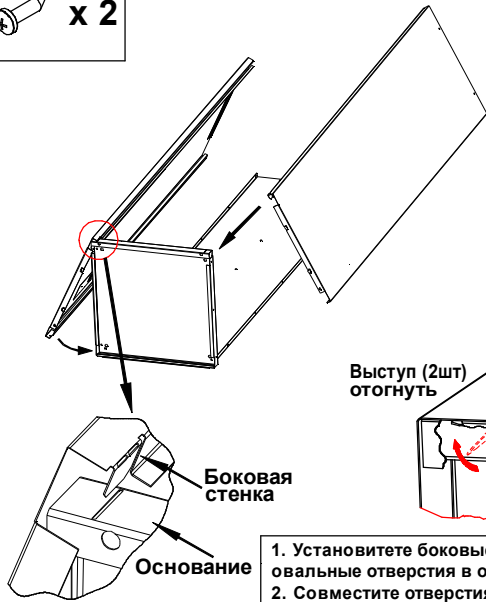

Выступ (2шт)
отогнуть

Основание

1. Установите боковые стенки так, чтобы выступы попали в овальные отверстия в основании (см. рис.1)
2. Совместите отверстия под крепеж на боковых стенках с отверстиями на задней стенке
3. Закрутите шурупы согласно рис.2
4. Установить держатель инвентаря на правую стенку.

Рис.2



Установка
держателя
инвентаря

Язычок (4шт)
отогнуть
на 150°-180°

1

x 4

x 4


x 4

Установка крыши

Вид сзади шкафа



Боковая
стенка

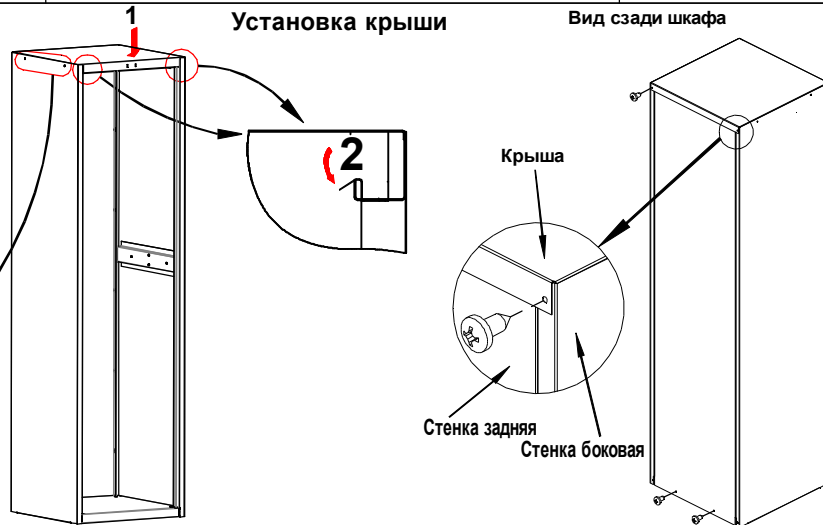

Крыша

Стенка задняя

Стенка боковая

1. Установить локер вертикально. Установить крышу, и отогнуть язычки.
 2. Закрепить крышу 4-мя винтами с гайками-"барашками"
 3. Вкрутить 4 шурупа (см. вид шкафа сзади)
- Примечание: Боковые гибы крыши вставляются внутрь шкафа между боковой стенкой и ребром. Задний гиб согласно вырубке.

Примечание:
Стрелки с цифрами обозначают
порядок действий при установке

2



x 2



x 4



x 10



x 2

Рис.1



Рис.2



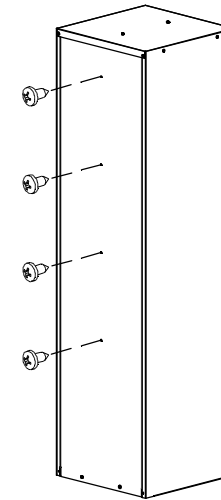


Рис.3

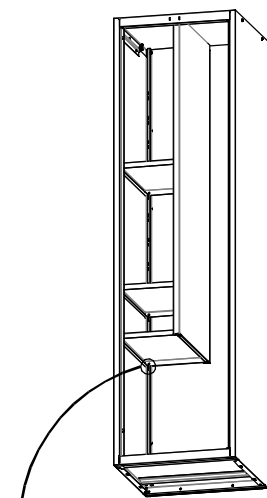

Установка
клипсы

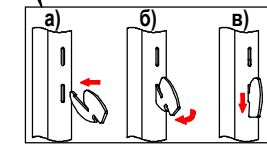


1. Прикрутить перегородку к крыше 2-мя винтами и гайками - "барашки". (рис.1)
2. Прикрутить перегородку к задней стенке 4-мя шурупами. (рис.2)
3. Установить нижнюю полку с помощью 2-х клипс.

Остальные полки крепятся на требуемой высоте 4-мя клипсами. (рис.3)

3

Установка регулируемых опор

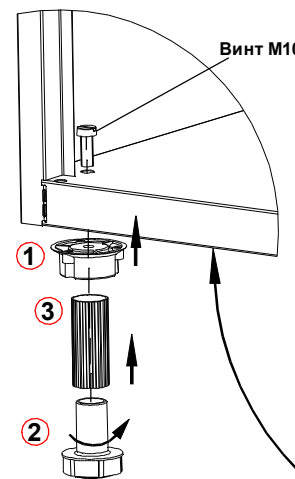


Винт M10


1

3

2

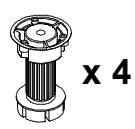


x 4

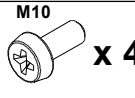

M10
x 4



x 2

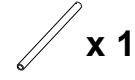

x 1



x 2

4

Примечание:
Стрелки с цифрами обозначают
порядок действий при установке

При установке трубы, S-образные
крючки одевать изнутри локера.